

# CONFIGURACIÓN RÁPIDA de DMS Pro



Esta guía de configuración proporciona un acceso directo para establecer una cuenta Eversense DMS Pro adaptada a su clínica. Para obtener más instrucciones, consulte la Guía del usuario de DMS Pro (<https://provider.eversensecgm.com/user-guides/>).

## 1 Registrarse en DMS Pro

Vaya a <https://globalpro.eversensedms.com/login>. Haga clic en “Registrarse”.

Haga clic en “Registrarse”

Para profesionales sanitarios

eversense  
Data Management System Pro

Español

Correo electrónico \*

Contraseña \*

Inicio sesión

¿Necesita una cuenta Eversense DMS Pro? [Regístrese](#)

¿Ha olvidado la contraseña? [Contáctenos](#)

¿Problema al iniciar la sesión? [Contáctenos](#)

Para iniciar sesión en Eversense DMS Pro el sistema MCG, haga clic [aquí](#)

Senseonics

## 2 Solicite una cuenta de Eversense DMS Pro

Introduzca la información de la clínica para cumplimentar el formulario.

- En “Nombre” y “Apellidos” se recomienda poner el nombre de la clínica o el nombre del profesional sanitario principal asociado a la consulta. (Esto es lo que sus pacientes verán cuando compartan sus datos).
- Seleccione un “Título” del menú desplegable y complete los campos obligatorios restantes.\*

### Nota:

Vea la Guía del usuario de Eversense DMS Pro para añadir proveedores individuales a su clínica de Eversense DMS Pro.

\*No puede utilizar la misma dirección de correo electrónico para la cuenta de Eversense DMS Pro y una cuenta personal de Eversense DMS.

Haga clic en “Enviar” cuando complete formulario.

eversense

Solicitar una cuenta Eversense DMS Pro

Información de contacto

Nombre \*      Apellido \*      Título \*

Correo electrónico \*      Confirme su correo electrónico \*      Número de teléfono \*

Consulta de atención médica o nombre del centro \*

Línea de dirección 1

Línea de dirección 2

Ciudad      Región      Código postal

Revise y confirme los siguientes elementos antes de continuar

Aceptar los [Términos y condiciones de uso](#)

No soy un robot

Enviar

¿Ya dispone de una cuenta? [Vaya a iniciar sesión](#)

Copyright © 2023 Senseonics®. Todos los derechos reservados.

## 3 Recibirá dos correos electrónicos

- La confirmación de registro de la cuenta.
- Un correo electrónico de aprobación de la cuenta (puede tardar hasta 24 horas). Haga clic en el enlace<sup>1</sup> en el correo electrónico para completar la activación de la cuenta. A continuación, registre la información de la cuenta en la casilla de la derecha.

<sup>1</sup>El enlace caduca a las 72 horas, pero puede solicitar que se le envíe un nuevo correo electrónico.

Nombre de la clínica: .....

Correo electrónico: .....

Contraseña: .....

N.º de identificación de la clínica:  
(véase el paso 4) .....

#### 4 Inicie sesión en la cuenta Eversense DMS Pro

Una vez iniciada la sesión, aparecerá en la parte superior de la pantalla el ID de clínica que se le haya asignado.


##### Notas:

Los pacientes necesitarán su número de identificación de la clínica cuando envíen una solicitud para compartir los datos de su MCG para la clínica.



#### 5 Invite a los pacientes a la clínica:


- En la barra de navegación de la izquierda, haga clic en **"Pacientes"** y luego seleccione **"Invitar Paciente"**.
- Introduzca el correo electrónico de Eversense del paciente (el que utilizó para crear su cuenta Eversense).
- Haga clic en **"Buscar en Eversense"** para localizar al paciente y enviar la invitación.

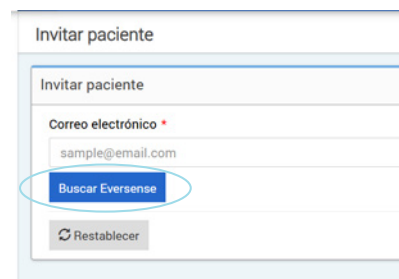

Si el correo electrónico del paciente está registrado, se mostrará una ventana a la derecha. Cumplimente toda la información obligatoria y haga clic en **"Enviar"**. El paciente puede aceptar la invitación por correo electrónico o en la aplicación Eversense.

##### Nota:

Si el correo electrónico introducido no está registrado en Eversense DMS, recibirá un mensaje de error. Confirme con el paciente cuál es la dirección de correo electrónico que utilizó al crear la cuenta.

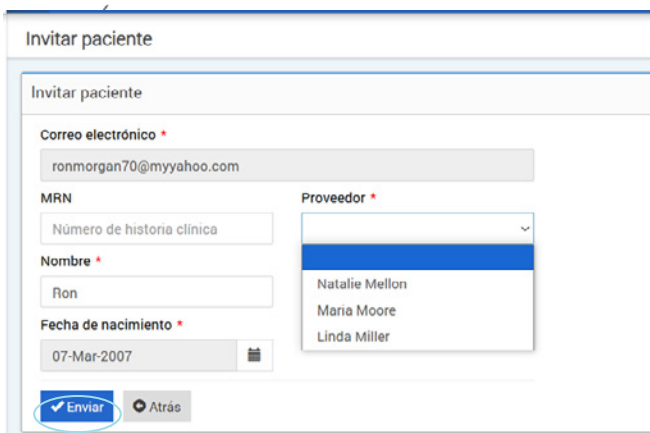

Mientras el paciente no haya aceptado la invitación, aparecerá el mensaje **"Pendiente de aprobación"** en la columna "Estado". Una vez que la acepte, su estado cambiará a **"Activo"**.



##### Nota:

Los pacientes pueden solicitar compartir sus datos. Las solicitudes pendientes de los pacientes aparecerán en la barra de navegación izquierda. Haga clic en **"Pacientes > Solicitudes pendientes"**.

Para obtener información adicional o asistencia sobre Eversense DMS Pro, consulte la Guía del usuario de DMS Pro, póngase en contacto con su representante de Eversense o con el servicio de atención al cliente de Eversense: **900 100 117 (extensión 2) o [eversense.es@ascensia.com](mailto:eversense.es@ascensia.com)**

© 2024 Senseonics, Inc.  
Todos los derechos reservados.  
© 2024 Ascensia Diabetes  
Care Holdings AG.  
Todos los derechos reservados.



DISTRIBUIDO POR ASCENSIA DIABETES CARE SPAIN, S.L.  
WTC Alameda Park Edificio 6, 4ª Planta.  
Plaça de la Pau s/n  
08940 Cornellà de Llobregat  
Barcelona, España  
900 100 117  
[www.diabetes.ascensia.es](http://www.diabetes.ascensia.es)

Fabricado por Senseonics, Inc.  
20451 Seneca Meadows Parkway  
Germantown, MD 20876-7005

El sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) Eversense® 365 está indicado para medir de forma continua los niveles de glucosa durante un máximo de un año en personas (a partir de 18 años de edad) con diabetes. El sistema está indicado para usarlo como sustitución de las mediciones de glucosa en sangre (GS) mediante punción capilar para las decisiones de tratamiento de la diabetes. Las mediciones de glucemia capilar son necesarias para la calibración una vez a la semana después del día 13, y cuando los síntomas no coinciden con la información proporcionada por el sistema de MCG o cuando se toman medicamentos de la clase de las tetraciclinas. Los procedimientos de inserción y extracción del sensor son realizados por un profesional sanitario certificado. El sistema de MCG Eversense 365 es un dispositivo de venta con receta, los pacientes deben hablar con su profesional sanitario para obtener más información.

Para obtener información sobre seguridad, consulte <https://global.eversensedabetes.com/safety-info/>  
Eversense, el sistema de monitorización continua de glucosa Eversense 365 y el logotipo de Eversense son marcas comerciales de Senseonics, Incorporated. Las demás marcas y sus productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y se utilizan únicamente con fines informativos. No debe inferirse ni considerarse implícita ninguna relación ni aprobación. PP-SENS-US-0260 CGM0083 Rev.103-25